

**FICHA TECNICA**  
**FUNDA DESECHABLE PARA CÁMARA**

**MARCA:** BEST CARE®

**MODELO:** JTD-250


**PROCEDENCIA:** China

**FABRICANTE:** Hangzhou Valued Medtech Co., Ltd

**1. DESCRIPCION**

La funda médica desechable para cámara está fabricada principalmente con película de polietileno. Este producto se presenta en envase estéril y puede colocarse directamente sobre cables o instrumentos antes del procedimiento quirúrgico, lo que permite garantizar plenamente un entorno estéril en el sitio operatorio.

*Partes.*

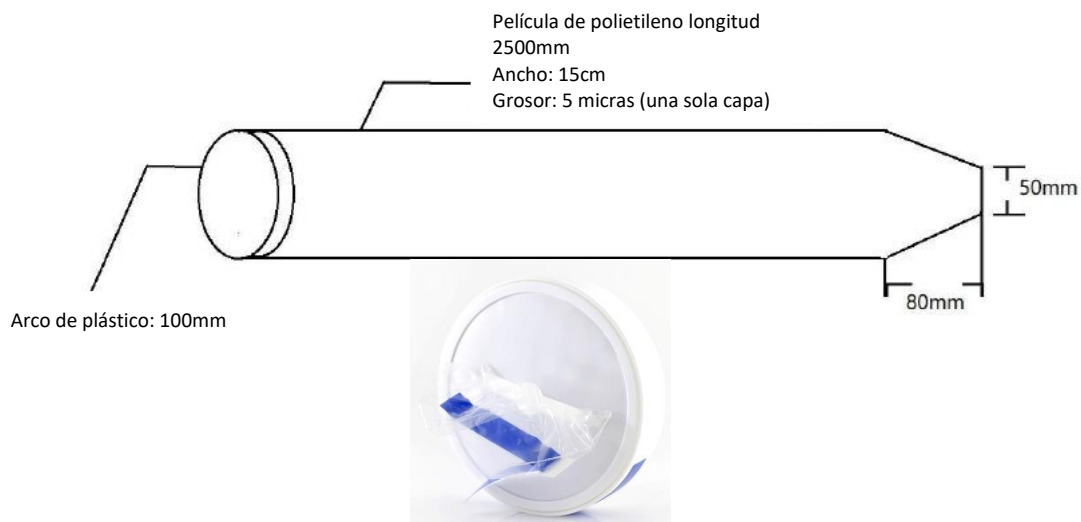

Composición química: El material principal del dispositivo es polietileno transparente (PE) y polipropileno (PP).

**Características**

- Adecuada para sistemas de cámara en alta definición sin comprometer la calidad de imagen.
- El extremo cerrado actúa como una barrera estéril confiable que protege completamente los instrumentos.
- Permite cambios rápidos y sencillos del endoscopio durante el procedimiento sin comprometer la esterilidad.
- La funda está comprimida dentro de un arco circular de plástico de 10 cm de diámetro. Un extremo de la funda se encuentra dentro del arco, mientras que el otro extremo cuenta con una cinta
- El arco de plástico asegura una manipulación cómoda y sencilla.
- Se suministra estéril, en envase individual, y está diseñado para un solo uso.



### *Campo de Aplicación*

- Departamento de Radiología
- Sala de Operaciones

### **Dimensiones**

- Longitud: 2.50 m
- Ancho: 15 cm
- Espesor: 5 micras

## **2. INTENCION DE USO**

El producto se utiliza para aislar y proteger instrumentos médicos, contribuyendo así a prevenir infecciones cruzadas durante procedimientos quirúrgicos. Está destinado a ser utilizado por profesionales médicos en el quirófano. El grupo objetivo de pacientes para este dispositivo incluye a cualquier persona que requiera una cirugía endoscópica en la que se utilice un endoscopio.

## **3. PRECAUCIONES, RESTRICCIONES Y ADVERTENCIAS**

### **Contraindicaciones**

No se conocen contraindicaciones.

### **Precauciones**

1. Este dispositivo se suministra estéril; ha sido esterilizado con óxido de etileno. No utilizar el producto después de la fecha de vencimiento indicada como "Usar antes de" en el empaque.
2. Este dispositivo está destinado a un solo uso y no debe ser reprocesado ni reesterilizado. ¡Su reutilización puede causar infecciones cruzadas!
3. Inspeccione el empaque y el producto antes de su uso. No utilice el dispositivo si está dañado; no lo utilice si la barrera de esterilización o su empaque están comprometidos.
4. Este dispositivo está destinado a ser utilizado por personal calificado, y en el departamento de radiología o sala de operaciones.



## Hangzhou Valued Medtech Co., Ltd

5. Utilice el dispositivo con precaución para evitar lesiones al paciente.
6. Si ocurre cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo, repórtelo al fabricante, al representante autorizado y a la autoridad sanitaria competente local.

### **Condiciones de almacenamiento.**

El dispositivo empacado debe almacenarse en un ambiente limpio y bien ventilado, con una humedad relativa entre 10% y 80%, y temperatura entre 10 °C y 35 °C. Mantener seco y alejado de la luz solar.

### **4. FORMA DE PRESENTACION**

Caja de cartón de 10 y 100 unidades, cada unidad envasada en sobre de papel-plástico (papel grado médico de 70 g/m<sup>2</sup> + película blanca PET/PP5.2), de 140 × 95 mm y 600 × 120 mm.